

enovis™

 chattanooga®

Cefar URO

**TRAITER LES SYMPTÔMES DE L'INCONTINENCE  
PAR HYPERACTIVITÉ VÉSICALE**

BROCHURE PATIENT





# CHATTANOOGA® EN QUELQUES MOTS :

1 - EXISTE DEPUIS 1947

2 - N°1 DE LA RÉÉDUCATION EN FRANCE

3 - UN SERVICE APRÈS-VENTE BASÉ EN FRANCE

Depuis 1947, Chattanooga®, plus grand fabricant mondial de matériel de rééducation et de soulagement de la douleur, contribue à soigner les patients en hôpital, cabinet ou à domicile.

Dans le but d'assurer un suivi personnalisé et un accompagnement dans l'éducation thérapeutique du patient, Chattanooga® travaille en partenariat avec plusieurs prestataires de santé spécialisés dans le traitement de la rééducation périnéo-sphinctérienne en général.



#### SERVICE APRÈS-VENTE :

contact.sav@enovis.com  
05 59 52 80 90


## VOTRE MEDECIN VOUS A PRESCRIT **UN CEFAR URO**

Ainsi que les électrodes pour la prise en charge des symptômes de votre incontinence liée à une hyperactivité vésicale.

Vous pourrez vous procurer le Cefar URO Chattanooga® et les électrodes en présentant l'ordonnance dans un magasin de matériel médical, en pharmacie ou auprès de votre prestataire de santé à domicile (demander conseil à un professionnel de santé), en précisant les références suivantes :

- **Cefar URO Chattanooga® :** Code GTIN: **0190446822905**
- **Électrodes Dura-Stick Plus Ø 32 mm :** Code ACL: **3401097384344**

Le Cefar URO Chattanooga® peut être acheté ou loué sur une période inférieure ou égale à 26 semaines. L'achat du Cefar URO n'est possible qu'après une période probatoire (location) de 6 à 8 semaines minimum. Les électrodes cutanées sont remboursées à hauteur d'un forfait annuel. Le Cefar URO Chattanooga® est remboursé en France au tarif figurant sur la LPPR et est garanti pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat.

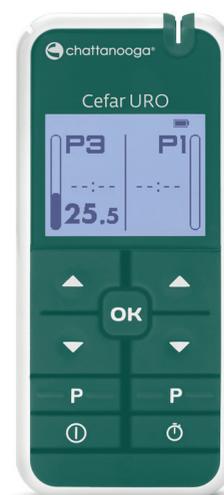

### LA TECHNIQUE

Votre médecin vous a prescrit l'utilisation d'un électrostimulateur afin de traiter les symptômes de l'incontinence par hyperactivité vésicale.

Le Cefar URO Chattanooga® est un stimulateur électrique à deux canaux. De petite taille, il propose des programmes pré-réglés délivrant des courants de faible intensité pour une utilisation externe grâce à des électrodes de surface (neuromodulation).

Le Cefar URO Chattanooga® propose :

- 4 programmes différents pour traiter les symptômes liés à l'hyperactivité vésicale
- 3 plages de programmes à personnaliser

# STIMULATION DU NERF TIBIAL POSTÉRIEUR & TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE PAR HYPERACTIVITÉ VÉSICALE

## INCONTINENCE PAR HYPERACTIVITÉ VÉSICALE

Elle touche autant les hommes que les femmes. Elle peut avoir pour origine un dysfonctionnement du système nerveux qui contrôle la vessie. L'incontinence par hyperactivité vésicale se traduit par une envie inopinée et intense d'uriner, suivie d'une contraction soudaine de la vessie qui peut conduire à une fuite urinaire involontaire. **L'objectif de traitement** est d'aider à inhiber les contractions involontaires de la vessie afin de réduire les symptômes d'incontinence tels que l'urgenterie, les mictions fréquentes diurnes et/ou nocturnes. La stimulation constante à basse fréquence permettra de produire un effet relaxant sur la vessie hyperactive.


## EN PRATIQUE

Les mécanismes physiologiques permettent le traitement des symptômes de l'incontinence par hyperactivité vésicale par stimulation du nerf tibial postérieur au niveau de la cheville.

La stimulation est unilatérale au niveau de la face interne de la cheville.

Votre praticien vous recommandera les paramètres les plus appropriés à votre pathologie, le programme le plus utilisé étant le numéro 3.

L'intensité devra correspondre à une sensation prononcée de fourmillements sur la zone stimulée et sous la voûte plantaire.

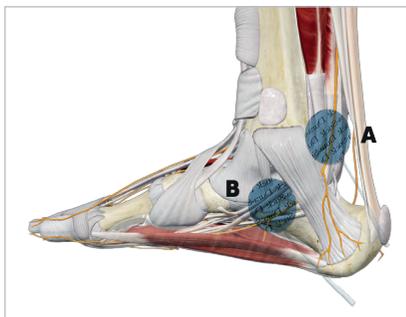

## ON UTILISERA POUR CETTE STIMULATION

- 2 petites électrodes rondes Ø = 32 mm
- Les électrodes devront être placées selon la recommandation de votre praticien.
- Un exemple est proposé ci-contre avec un placement sur la face interne de la cheville, en rétro-malléolaire (A) et sous-malléolaire (B).

# ÉLECTRODES CUTANÉES AUTOCOLLANTES & TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE PAR HYPERACTIVITÉ VÉSICALE

## QUALITÉ

- Le revêtement textile souple assure une adhérence optimale en épousant parfaitement les contours anatomiques
- Dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollage facilité.

## TAILLE

Les électrodes cutanées autocollantes Dura-Stick® Plus sont notamment utilisées dans le cadre de la stimulation du nerf tibial postérieur pour le traitement des symptômes de l'incontinence liés à l'hyperactivité vésicale. Il est alors conseillé d'opter pour un format rond, tel que :

DÉSIGNATION	TAILLE	CODE ACL
-------------	--------	----------

Électrodes  
Dura-Stick® Plus  
(1 sachet de 4 électrodes)

Ø 32 mm

3401097384344





**enovis**<sup>TM</sup>

*Creating Better Together*<sup>TM</sup>

***chattanoogarehab.fr***

Enovis<sup>TM</sup> - DJO France S.A.S, Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar, 64990 Mouguerre,

Lire attentivement la notice et demander conseil à un professionnel de santé. Le Cefar URO Chattanooga<sup>®</sup> est un dispositif médical de classe IIa qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalué par l'organisme notifié BSI - Fabricant : DJO France S.A.S.

\*Créer Mieux Ensemble.

© Enovis<sup>TM</sup> - DJO France S.A.S - MKGRSMED465 - REV A - 01/2024

